

## Montage du matelas

---

RotoBed® Care est livré avec un matelas composé d'une partie principale et d'une partie de pied.


Le matelas principal a 5 boutons à l'arrière. Placez d'abord les trois boutons inférieurs dans les rainures au bas du lit. Faites glisser le matelas vers le pied. Maintenant, placez les deux boutons au centre du matelas dans les trous correspondants au milieu du lit.

De même, le matelas de pied a deux boutons, qui s'insèrent dans les deux trous ronds dans le lit.

## Montage des barrières de lit

---

Les lits de soins RotoBed® peuvent être livrés avec des barrières en métal ou en stratifié de chêne. Quel que soit le matériel, les rails de lit sont montés et retirés de la même manière:

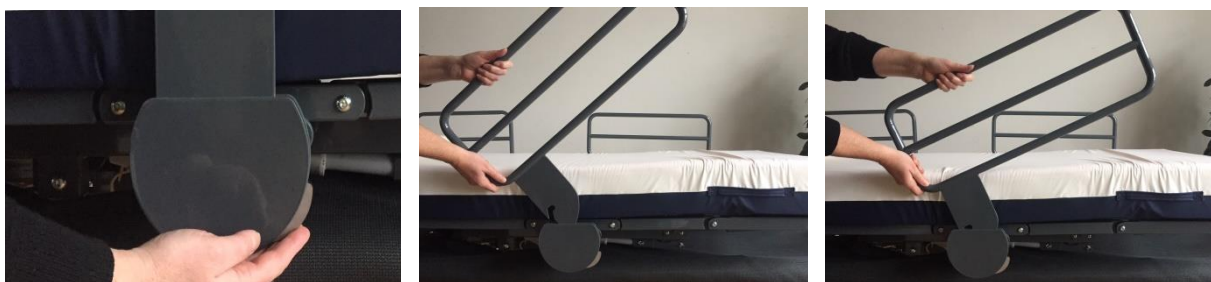

Appuyez sur le petit raccord en dessous tout en soulevant le barrière de lit.

Le barrière de lit peut tout simplement être remis en place et verrouillera automatiquement.

## Roues et freins

---

En standard, le lit est équipé de roues doubles Tente Linea intégrées. Les roues sont rotatives. Les freins fonctionnent par paires et peuvent être actionnés des deux côtés du lit.



---

**Remarque:** RotoBed® Care ne doit pas être utilisé par des personnes sans introduction dans l'utilisation du lit. Le lit est testé selon les dernières normes et règles applicables pour les lits de soins. Sachez que ni les enfants ni les animaux ne sont sous le lit lorsque les pièces du lit sont fixées. Lorsque la jambe est soulevée, ne la surchargez pas d'objets lourds ou de personnes. Le lit peut être utilisé par les utilisateurs selon les critères suivants: Poids 40-190 kg. Hauteur  $\geq$  146 cm. IMC  $\geq$  17.

## Guide rapide pour RotoBed®Care

**Sortie:** Appuyez sur la touche **Position du fauteuil** jusqu'à ce que le lit s'arrête en position confort. Relâchez le mécanisme de rotation en poussant légèrement la poignée à pied. Maintenant, tournez tranquillement le lit jusqu'à ce que la poignée se verrouille automatiquement. Appuyez à nouveau sur la touche **Position du fauteuil** jusqu'à la position de sortie. Pour faciliter la sortie, vous pouvez avec la télé-commande, déplacer le dossier vers l'avant et lever le lit un peu plus haut.




**Entrée:** Aidez l'utilisateur à s'asseoir le plus près possible du dossier. Appuyez sur la touche **Position de sommeil** jusqu'à ce que le lit s'arrête en position de confort. Relâchez le mécanisme de rotation en poussant légèrement la poignée à pied. Tournez calmement le lit jusqu'à ce que la poignée se verrouille automatiquement. Appuyez à nouveau sur la touche **Position de sommeil** jusqu'à ce que le lit soit tourné et horizontal.



Hauteur de siège standard sans matelas est de 32 cm au-dessus du sol. Pour le réglage individuel, voir le manuel d'utilisation.

## Télécommande

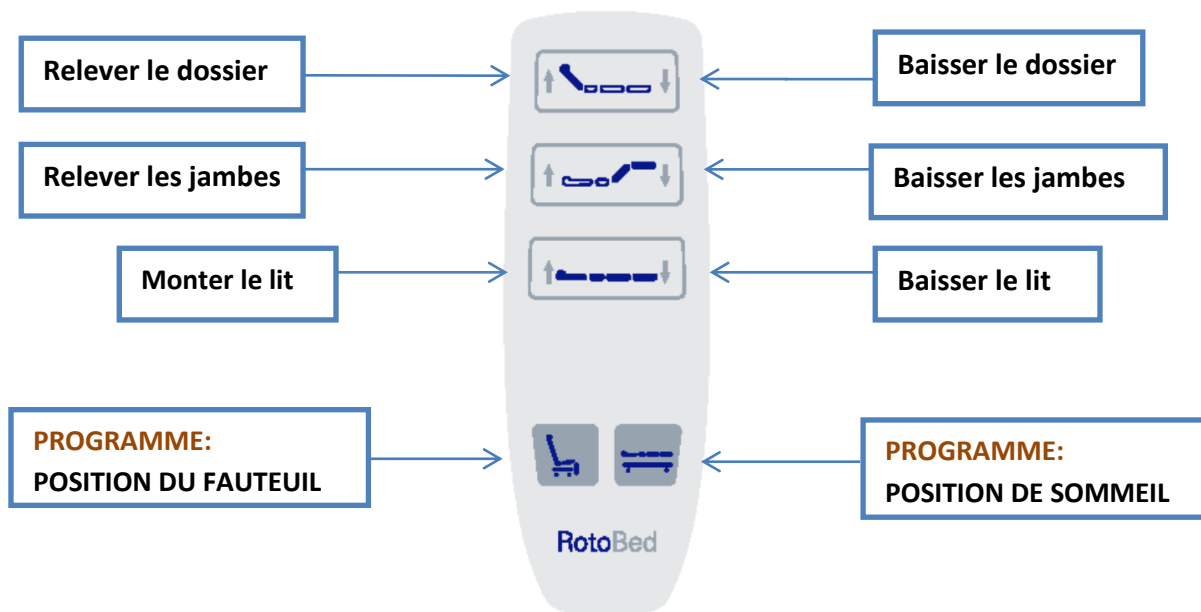

RotoBed®Care peut tourner à droite ou à gauche. Par conséquent, la télécommande peut également être connectée à la fois sur le côté droit et gauche du lit. Une télécommande supplémentaire peut être achetée comme désiré. Lorsque la télécommande n'est pas utilisée, suspendez-la sur le barrière de lit.