

Montage der Matratze


RotoBed®Free wird mit einer Matratze geliefert, die aus einem Hauptteil und einem Fußteil besteht.

Die Hauptmatratze hat 5 Knöpfe auf der Rückseite. Legen Sie zuerst die drei unteren Knöpfe in die Nuten an der Unterseite des Bettes. Schieben Sie die Matratze in Richtung Fußende. Drücken Sie nun die beiden Knöpfe in der Mitte der Matratze in die entsprechenden Löcher in der Mitte des Bettes.

Ebenso hat die Fußmatratze zwei Knöpfe, die in die zwei runden Löcher im Bett passen.

Montage die Bettgitter

RotoBed® Pflegebetten können mit Bettschienen aus Metall oder Eichenlaminat geliefert werden. Unabhängig vom Material werden die Bettschienen auf die gleiche Weise montiert und entfernt:

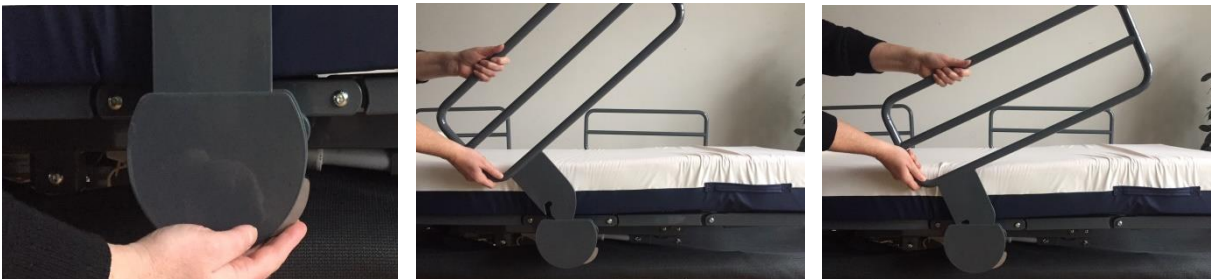

Drücken Sie den kleinen Beschlag, während Sie die Bettgitter.

Die Bettgitter können einfach wieder eingesetzt werden und verschließen sich automatisch.

Räder und Bremsen

Standardmäßig ist das Bett mit integrierten Tente Linea Doppelrädern ausgestattet. Die Räder sind drehbar. Die Bremsen arbeiten paarweise und können von beiden Seiten des Bettes bedient werden.



Hinweis: RotoBed®Free sollte nur von Personen verwendet werden, die eine Einführung in die Benutzung des Bettes haben. Das Bett ist nach den neuesten gültigen Normen und Regeln für Pflegebetten geprüft. RotoBed®Free sollte ausschließlich mit der Fernbedienung betrieben werden. Beachten Sie, dass sich keine Kinder oder Tiere unter dem Bett befinden, wenn die Bettteile eingestellt sind. Wenn der Beinteil des Bettes angehoben ist, belasten Sie ihn nicht mit schweren Gegenständen oder Personen. Das Bett muss von den Benutzern innerhalb der folgenden Kriterien verwendet werden: Gewicht 40-190 kg. Höhe \geq 146 cm. BMI \geq 17.

Kurzanleitung für RotoBed® Free



Einsteigen: Drücken Sie die Taste **Stuhlposition**, bis das Bett in der Ausgangsposition stoppt. Um den Ausgang zu erleichtern, können Sie mit der Fernbedienung die Rückenlehne nach vorne schieben und das Bett ein wenig anheben.



Wenn Sie einen schrägen Ausgang wünschen, um den Übergang zu einem Rollstuhl oder Gehwagen zu erleichtern, lesen Sie die Bedienungsanleitung.




Aussteigen: Setzen Sie sich so nah wie möglich an den Rücken. Halten Sie die Taste **Schlafposition** gedrückt, bis das Bett horizontal gedreht ist. Jetzt arbeitet RotoBed®Free wie ein normales Pflegebett.



Die Standardsitzhöhe ohne Matratze beträgt 32 cm über dem Boden. Informationen zur individuellen Einstellung finden Sie im Benutzerhandbuch.

Fernbedienung

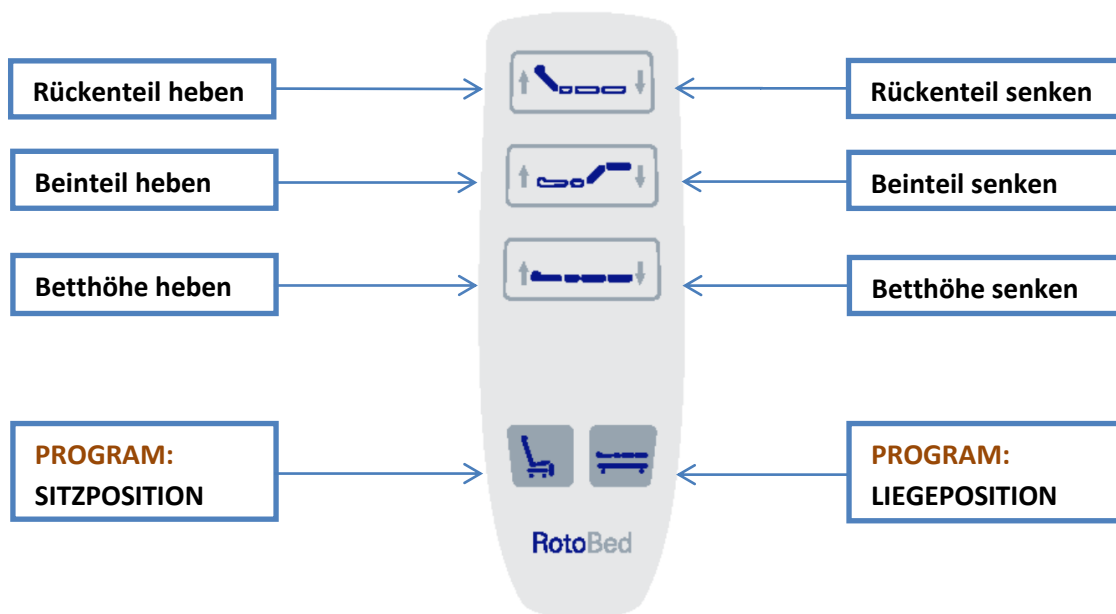

RotoBed®Free kann entweder nach rechts oder nach links drehen. Daher kann die Fernbedienung auch an der rechten und linken Seite des Bettes angeschlossen werden. Extra Fernbedienung kann wie gewünscht erworben werden. Wenn die Fernbedienung nicht verwendet wird, hängen Sie sie an die Bettgitter.