

## Snabbguide till RotoBed® Free



**Utgång:** Tryck på knappen **Sitt-position** tills sängen stannar i utgångsposition. För att underlätta utgången kan ryggstödet drivas den sista delen framåt och sängen höjas lite i höjd.



Vill du ha en snedställd utgång för att underlätta övergången till rullstol eller rollator, se bruksanvisningen.




**Inträde:** Tryck änden så långt bak som möjligt för bästa komfort. Tryck på knappen **Liggposition**, tills sängen är helt roterad och madrassen är horisontal. Nu fungerar RotoBed® Free som en vanlig vårdbädd.



Standard sitshöjd utan madrass är 32 cm över golvet. För individuell inställning, se bruksanvisningen.

## Fjärrkontroll

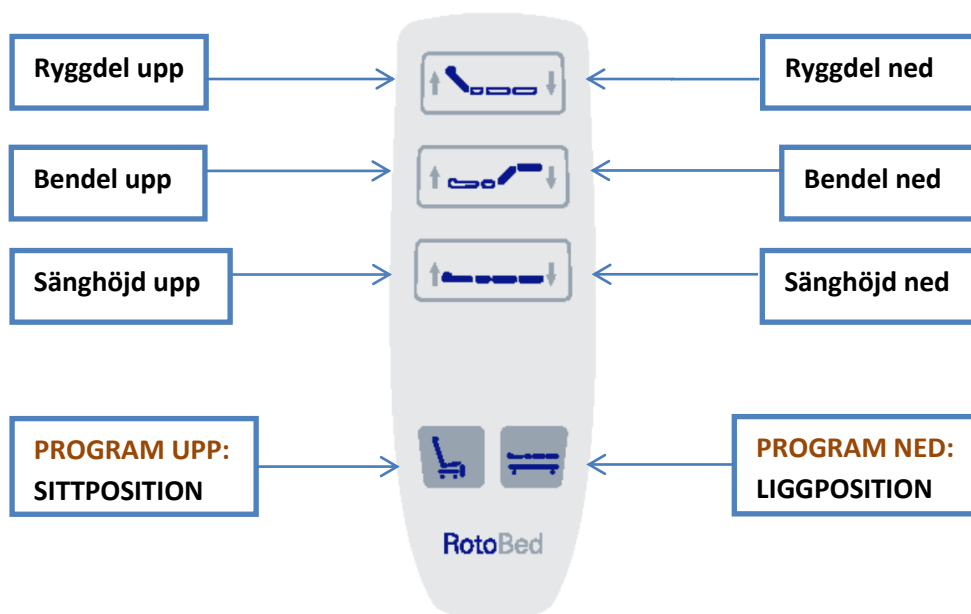

RotoBed® Free kan svänga antingen höger eller vänster. Därför kan fjärrkontrollen också anslutas till höger eller vänster sida av sängen. Ytterligare fjärrkontroll kan köpas. När fjärrkontrollen inte används hänger den på sänghästen.

## Montering av madrass

---

RotoBed®Free innehåller en madrass som består av en huvuddel och en fot-del.


Huvudmadrassen är utrustad med 5 knappar på baksidan. Lägg först de tre nedre knapparna i spåren längst ner på sängen. Skjut madrassen mot foten. Tryck nu på de två knapparna i madrassens mitt ner i motsvarande hål i mitten av sängen.

På samma sätt har fotmadrassen två knappar som pressas ner i de två runda hålen i sängytan.

## Montering av sänghästar

---

RotoBed® sängar kan levereras med sänghästar i metall eller eklaminat. Oavsett modell är sänghästarna monterade och borttagna på samma sätt:

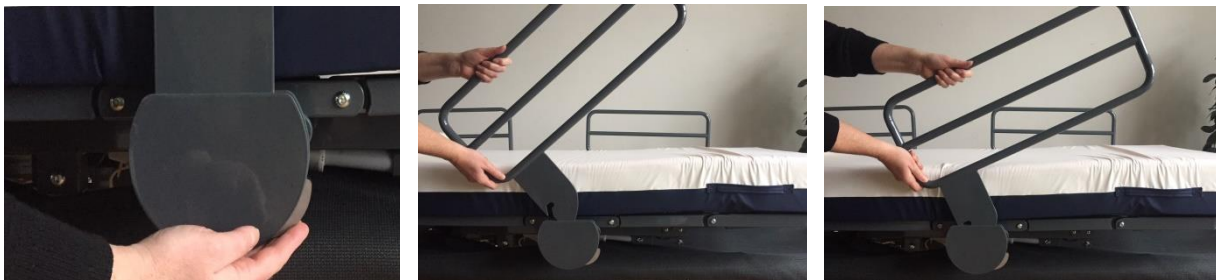

Tryck på det lilla fästet medan du lyfter sänghästen. Sänghästen sätts på igen och låses automatiskt.

## Hjul och bromsar

---

Sängen är standard med integrerat Tente Linea dubbelhjul. Hjulen är roterbara. Bromsarna arbetar i par och kan manövreras från båda sidor av sängen.



---

**OBS:** RotoBed®Free ska inte användas av personer utan introduktion vid användning av sängen. Sängen testas enligt gällande standarder och regler för vårbäddar. RotoBed®Free ska endast drivas med fjärrkontrollen. Var medveten om att varken barn eller djur ligger under sängen när sängens delar är inställda. När bendelen är uphöjd, ladda det inte på personer eller tunga föremål. Sängen måste användas av användare enligt följande kriterier: Vikt 40-190 kg. Höjd  $\geq$  146 cm. BMI  $\geq$  17.