



Montage af RotoBed® Underbed Light

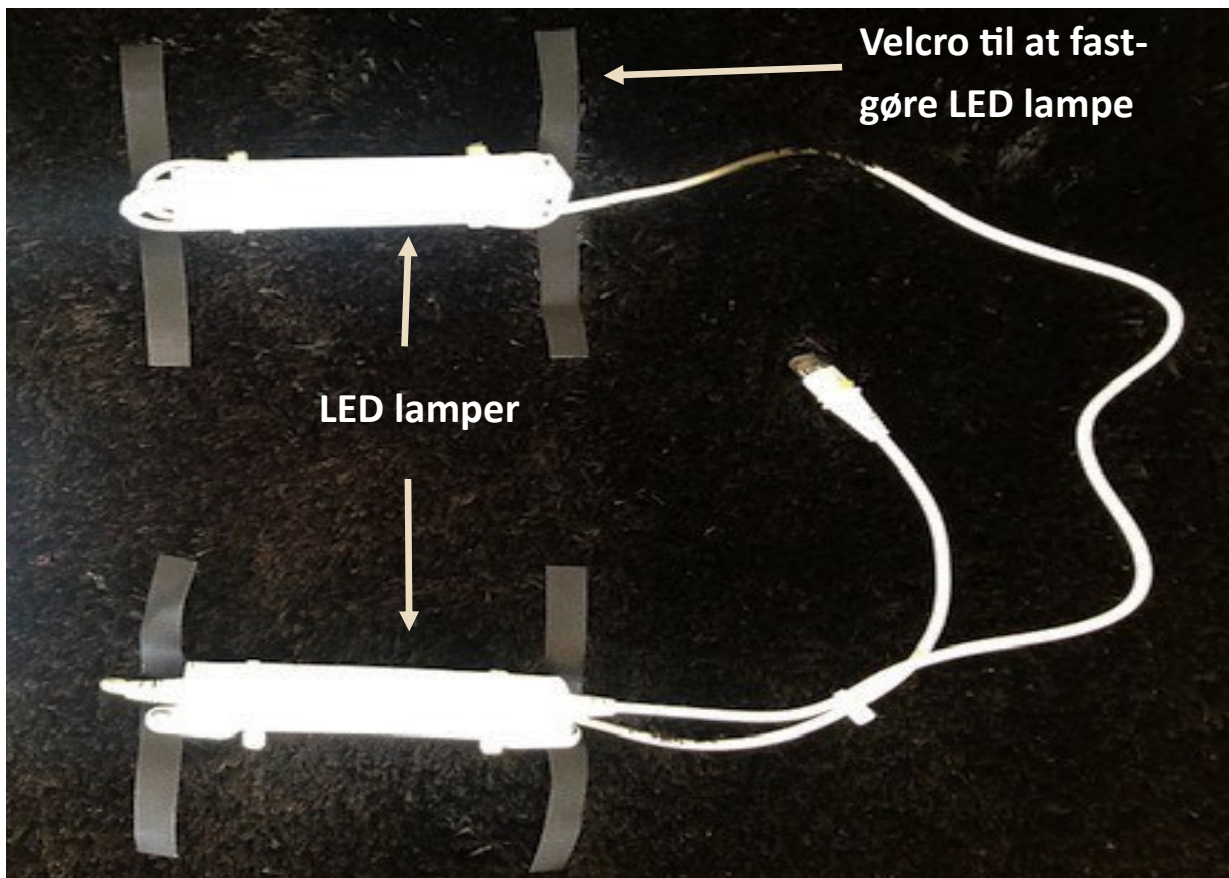


Start med at fjerne madrassen. Indstil sengen i udstigningsposition, og indstil bendelen til højst mulige position. Nu er du klar til at montere Underbed Light

1. Fjern beskyttelsescover til Signal boksen.

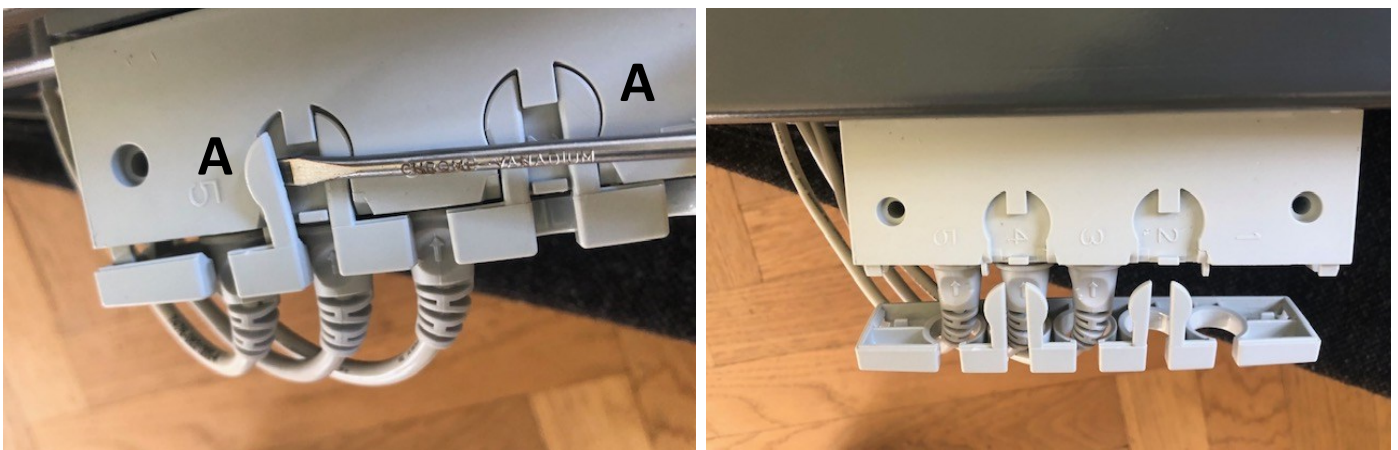


1.a) Benyt en flad skruetrækker eller lignende. Vrik spidsen af skruetrækkeren så de 4 små ben løftes og skubbes væk (A) indtil coveret kan skubbes af. Signal boksen er nu klar til at blive tilført et nyt kabel fra LED lamperne.

2. Montage af LED lamperne:

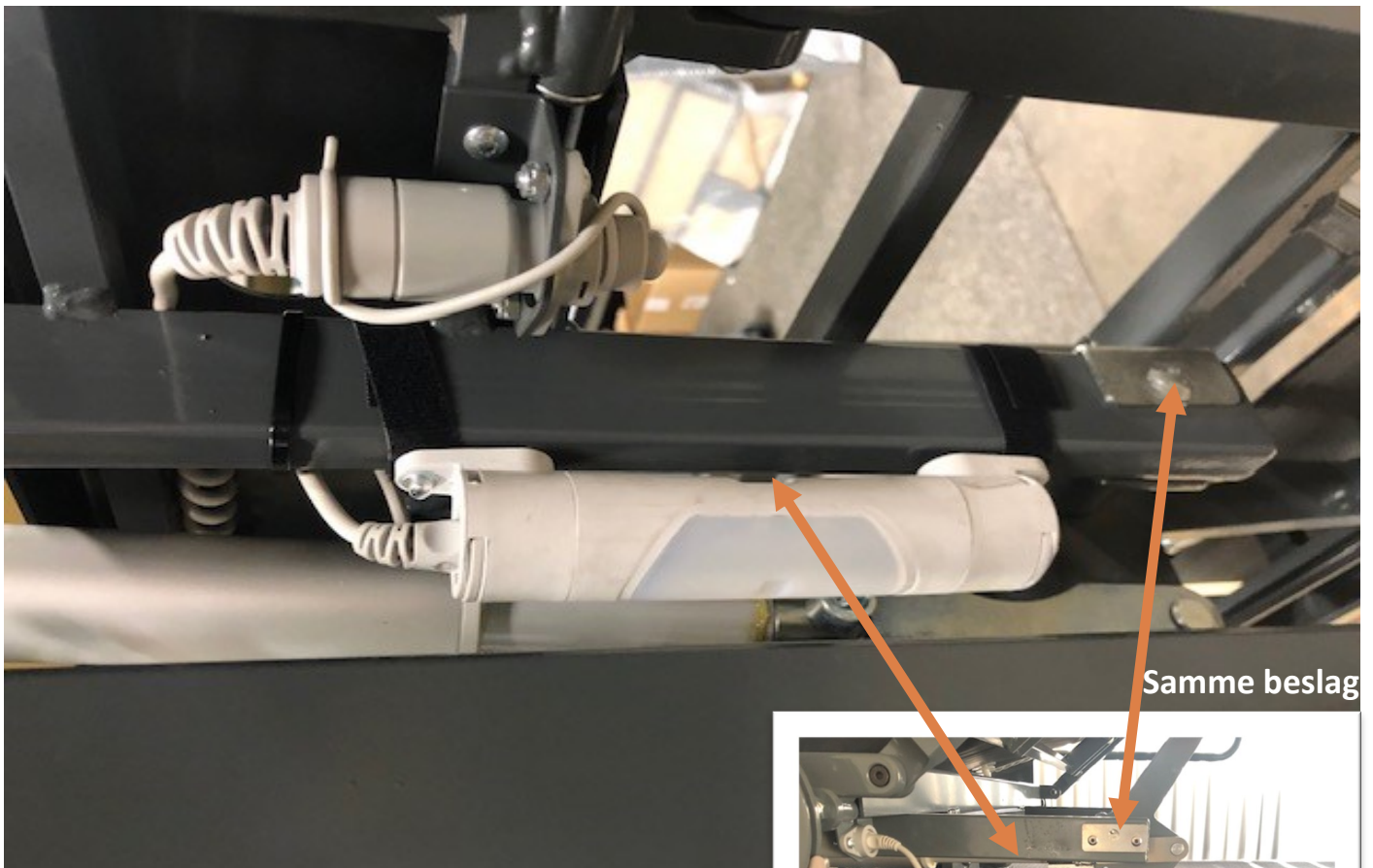

2.a) Brug velcro-stropperne til at fastgøre LED-lamperne på sengerammen under bendelen på begge sider af sengen.

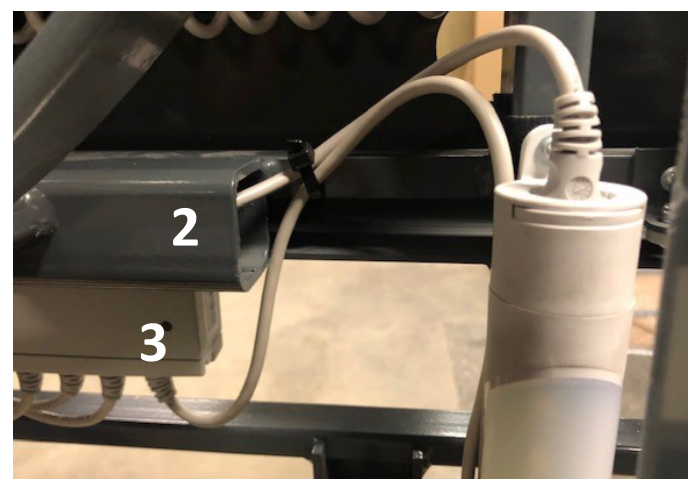

2.b) Tag det lange kabel (1), der er tilsluttet en af LED-lamperne, og før det gennem røret under sædet (2) og tilslut kablet til den anden LED-lampe. Det korte kabel fra LED-lampe nr. 2 skal tilsluttes i Signal boksen (3)